

F

**HOT RUBBER MODE D'EMPLOI:**

Ouvrir avec précaution! Attention aux ongles, bijoux et objets pointus qui risquent d'endommager le préservatif.

C'est parti! Comparer doucement le réservoir entre le pouce et l'index. Avant tout contact sexuel, placer le HOT RUBBER sur le gland, tourner et enrouler vers l'extérieur, puis le dérouler intégralement jusqu'à la base du pénis en direction.

Lubrifiant? Utiliser impitoyablement des produits solubles dans l'eau. Ne jamais utiliser de produits huileux tels que vaseline, huile pour bébés, lotion corporelle, lotion de massage, beurre, margarine, etc. Ils pourraient endommager les qualités de résistance du latex.

C'est fini! Retirer le pénis après l'éjaculation en maintenant le HOT RUBBER à la base pour éviter tout risque de glissement.

Important! Conserver les préservatifs au frais, au sec et à l'abri de la lumière directe du soleil. N'utiliser qu'une seule fois chaque HOT RUBBER, puis les jeter à la poubelle, jamais dans les toilettes. Lors d'application directe de médicaments (crèmes, suppositoires, etc.) au niveau du pénis ou du vagin dans qu'en cas de réactions d'irritation, solliciter l'avis du médecin ou du pharmacien. Le préservatif offre la meilleure protection contre les maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH (SIDA), et contre les risques de grossesse. Aucune méthode de prévention n'est à même de garantir une protection absolue.

Attention! Tenir hors de portée des enfants.

**HOT RUBBER CLASSIC** • profil anatomique • transparent

• avec réservoir • lubrifié

**HOT RUBBER BLACK** • noir • avec réservoir • lubrifié

**HOT RUBBER EASY** • plus long • plus large • transparent

• avec réservoir • lubrifié

**HOT RUBBER SWEET** • orne fine • rouge • avec réservoir

• lubrifié

**HOT RUBBER COLLECTION** • Boîte d'assortiment: 3, 1 x Classic, 1 x Sweet, 1 x Black, 10, 4 x Sweet, 3 x Classic, 3 x Black.



D

**HOT RUBBER RICHTIG ANWENDEN:**

Vorsicht ausgepackt! Saftmuck, Fingernagel oder ähnliches können das Präservativ beschädigen.

Es geht los! Reserviert mit Daumen und Zeigefinger sanft zusammenrollen. Vor jedem sexuellen Kontakt einen neuen HOT RUBBER mit Abwärtsschritt nach aussen auf die Etchel setzen und ganz über den erigierten Penis drücken.

Gleitmittel? Unbedingt wasserlösliche Produkte verwenden. Verwenden Sie keine öhrigen Gleitmittel wie Vaseline, Babyöl, Körperlotion, Massageöl, Butter, Margarine usw. Öhrige Gleitmittel zerstören das Kondom und machen es unbrauchbar.

Nochher. Beim Herausziehen HOT RUBBER am Glederschnitt festhalten, damit er nicht drückt.

Nicht vergessen: Präservative kühl, trocken und vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren. Jeden HOT RUBBER nur einmal verwenden. Gebrauchte HOT RUBBER in den Müll werfen, nicht ins WC. Falls Sie Arzneimittel direkt an Penis oder Vagina anwenden oder bei Unverträglichkeitsreaktionen, konsultieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Kondome bieten den besten Schutz vor sexuell übertragbaren Ansteckungsgefahren, wie z.B. AIDS. Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz vor Schwangerschaft und Infektion gewährleisten.

Achtung! Von Kindern fernhalten.

**HOT RUBBER CLASSIC** • anatomisch vorgeformt • transparent

• mit Reserviert • Gleitmittel

**HOT RUBBER BLACK** • schwarz • mit Reserviert • Gleitmittel

**HOT RUBBER EASY** • extra groß • transparent • mit Reserviert

• Gleitmittel

**HOT RUBBER SWEET** • Erdbeeraroma • rot • mit Reserviert

• Gleitmittel

**HOT RUBBER COLLECTION** • Sortimentspackung: 3, 1 x Classic, 1 x Sweet, 1 x Black, 10, 4 x Sweet, 3 x Classic, 3 x Black.

**GÜTEZEICHEN:**

Voraussetzung für die Erlangung des ok-Gütesiegels ist eine Verifizierung jedes Loses nach dem Reglement des Gütesiegels für Präservative.

**LABEL DE QUALITE:**

L'obtention du label de qualité ok exige le contrôle de chaque lot selon le règlement du label de qualité pour des préservatifs.

**MARCHIO DI QUALITA':**

Per ottenere questo marchio di qualità ok è necessario sottoporre ogni stock a un controllo secondo il regolamento del marchio di qualità per preservativi.

condomi erfurt produktionsgesellschaft mbh  
Tiergartenstraße 2 – D-99089 Erfurt  
<http://www.hot-rubber.com>

CE 0197

www.  
Condom-Anoniem  
.nl

HOT RUBBER  
THE CONDOM



A product of the  
SWISS AIDS FEDERATION

Each  
HOT RUBBER COMPANY  
financially supports  
AIDS prevention programs  
in its country

CH DOETSCH GREITHER AG, 4002 Basel

D Deutsche AIDS-Hilfe,  
Box 610149, 10971 Berlin

F condomi france S.A.S.,  
18, rue des Glorieux, Z.A.C. des Glorieux  
91160 Champs-lès-Monnaies

NL S.r.l. Safe Service, Postbus 3836,  
1001 AP Amsterdam

GR Eroploessu, Agios Sofios 41,  
Neo Smyrni, Athina 171-24

The Hot  
Rubber

FIG: 054502

